

各社口腔内スキャナーからのご依頼方法

•Sirona CEREC Primescan/Omniscam

シロナコネクトでの送受信が可能です。シロナコネクトにログインの上、「ニューデンタルリサーチ株式会社」でラボ検索を行い、お気に入りラボ登録設定を行ってください。その後データ送信可能となります。

•3shape Trios

3shape Communicate での送受信が可能です。3shape Communicate にログインの上、Connection 画面を開き、Add Connection から「newdentalresearch 又は dnrcadcam@gmail.com」を入力してください。

Add Connection 完了後、TRIOS を起動させて「設定」→「技工所接続」から newdentalresearch を選択→「communicate の設定」を開き、登録したメールアドレスとパスワードを入力すれば完了です。その後データ送信可能となります。

•Align iTero

マイアイテロでの送受信が可能です。アライン社ご担当の方へ「ニューデンタルリサーチ株式会社」で送信先追加のご依頼を行ってください。補綴モード設定及びコネクト接続完了後、送信先では英語表記となっています「NEWDENTALRESEARCH」を選択してデータを送信してください。

※補綴モード設定がされていない iTero ユーザー様はアライン社への手配が別途必要になります。

•SHINING 3D Aoralscan

SHINING 3D 社クラウドサービスでの送受信可能です。

パートナー検索で「ニューデンタルリサーチ 又は dnrcadcam@gmail.com」と入力してください。その後データ送信可能となります。

•Medit i700/i500

Medit Link での送受信が可能です。

パートナー検索で「ニューデンタルリサーチ 又は dnrcadcam@gmail.com」と入力してください。その後データ送信可能となります。

**NEW
DENTAL
RESEARCH**